

Lütfen lolipop testini yalnızca okul tarafından talimat verilmişse kullanın!

Test nasıl işliyor:

- Çocuğunuz plastik çubuğu 30 saniye ağzına çekecektir.
- Plastik çubuğu plastik boruya yerleştirin!
- Plastik tüpü plastik poşete koyun!



- Plastik poşeti sabah 8: 30'da okul girişine getirin.



Çocuğunuzun laboratuvar sonuçları gelene kadar evde kalması gerekecek.



Testi çevrimiçi olarak kaydedin:

- Eve vardığınızda testi kaydetmelisiniz. Bunu yapmak için, testle birlikte aldığınız QR kodunu tarayın cep telefonunuz veya tabletinizle! Bu genellikle fotoğraf işlevi veya bir QR kodu uygulamasıyla mümkündür.
- Açılan web sitesine çocuğunuzun bilgilerini girmeniz gerekecektir.



PERSÖNLICHE DATEN*	
Nachname	Vorname
Geburtsdatum tt.mm.jjjj	
Straße / Hausnr.	
PLZ	Ort
Telefonnummer	
E-Mail-Adresse	
<input type="radio"/> Weiblich <input type="radio"/> Männlich <input type="radio"/> Divers	
Name der Schule und Klasse	
Abstrichdatum tt.mm.jjjj	

AGB & DATENSCHUTZ
<input type="checkbox"/> Ich bin mit den AGB einverstanden.*
* Pflichtfelder
<input type="button" value="Daten absenden"/>

Şimdi hüküm ve koşulları kabul etmeli ve göndermelisiniz.

Test sonuçlarınızı çevrimiçi olarak almak için barkoda tekrar ihtiyacınız olacak:

- Barkodu cep telefonunuz veya tabletinizle tekrar tarayın!
- Şimdi „Schnellbefund ansehen“ e tıklayın!



- Sonuç henüz görüntülenmiyorsa, daha sonra tekrar deneyin!